



Dp Skin® CONCEPT

Le Diagnostic de peau 100% Personnalisé



- Analyse et diagnostique la condition de la peau (Hydratation, Pores, Kératine,
- Recommande produits et traitements en fonction des résultats

Rides, etc...)

- Renforce la fidélité de vos client(e)s envers votre institut
- 4 Compare les résultats et les images pour valider l'évolution
- 5 Envoie les résultats aux client(e)s par email



Dp PRINCIPES D'ANALYSE

Dp Skin® est composé de deux éléments clés:

Caméra Optique

Capture l'image qui sera envoyée au logiciel. Possède différents systèmes de polarisation et LEDs, adaptés chaque paramètre. Envoie les images via Wi-Fi en temps réel au logiciel. L'analyse de tous les paramètres s'effectue avec un seul capteur.

Logiciel d'analyse Dermoprime

Celui-ci reçoit les images prises avec le capteur, traite et analyse chaque image pour ensuite diagnostiquer chaque paramètre, le tout à travers une interface professionnelle, simple et facile à utiliser. Une fois réalisé le diagnostic, le logiciel recommande des produits et traitements spéciaux en fonction des résultats et du profil du client. Toutes les données sont conservées dans le dossier du client.



Dp principesd'analyse

Dp Skin® est composé de deux éléments clés:

Caméra Optique

Capture l'image qui sera envoyée au logiciel. Possède différents systèmes de polarisation et LEDs, adaptés chaque paramètre. Envoie les images via Wi-Fi en temps réel au logiciel. L'analyse de tous les paramètres s'effectue avec un seul capteur.

Logiciel d'analyse Dermoprime

Celui-ci reçoit les images prises avec le capteur, traite et analyse chaque image pour ensuite diagnostiquer chaque paramètre, le tout à travers une interface professionnelle, simple et facile à utiliser. Une fois réalisé le diagnostic, le logiciel recommande des produits et traitements spéciaux en fonction des résultats et du profil du client. Toutes les données sont conservées dans le dossier du client.





TYPE DE PEAU

> Type de peau

La surface de la peau est recouverte d'un film hydrolipidique. La quantité et la qualité du film hydrolipidique déterminent le type de peau.

Elles varient notamment en fonction de l'âge et de la santé du sujet, du climat, de la pollution et de l'hygiène de vie.

On distingue 4 types de peau : peau sèche, peau mixte, peau normale, peau grasse.



METHODE D'ANALYSE

Par prélèvement de sébum. Dp Skin traite l'image captée par l'optique. Grâce aux différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de distinguer et de définir le niveau de sébum selon la zone analysée (T et U).



HYDRATATION

> Hydratation de la peau

Le manque d'hydratation de la peau est la principale cause de la plupart des maladies de la peau et des problèmes d'anesthésie.

Indispensable pour la recommandation de produits hydratants et de traitements.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100, où un nombre plus élevé signifie une meilleure condition.



METHODE D'ANALYSE

Système capacitif. Dp Skin dispose d'un capteur ultra précis qui peut même détecter la plus petite variation en fonction de la répartition de l'humidité dans la couche cornée de la peau.


PORES

> Dilatation des Pores

Une dilatation excessive des pores peut être un indicateur d'un excès de sécrétion de sébum ou de l'accumulation d'impuretés.

Essentiel pour la recommandation de la régulation du sébum et des produits de nettoyage.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100, où un nombre inférieur signifie une meilleure condition.

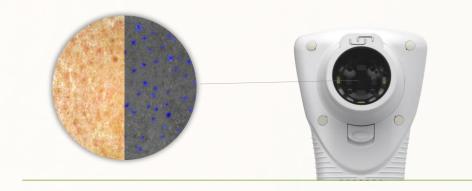

METHODE D'ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique, grâce aux différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de distinguer et de définir la taille et la profondeur des imperfections sur la peau, dans ce cas, les pores.



TACHES

> Hyper pigmentation

L'hyper pigmentation de la peau peut être causée par le vieillissement ou les agents externes, cela commence à partir des couches les plus profondes de la peau.

Indispensable pour la recommandation des produits d'éclaircissement et de protection solaire.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100, où un nombre inférieur signifie une meilleure condition.



METHODE D'ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique, grâce aux différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de distinguer et de définir la taille des tâches des couches les plus profondes et non visibles de la peau.

Dp parametres


RIDES

> Taille et Profondeur

Les rides sont un indicateur clair du manque d'élasticité de la peau et d'autres problèmes.

Essentiel pour la recommandation de produits anti-âge et nutritifs.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100, où un nombre inférieur signifie une meilleure condition.

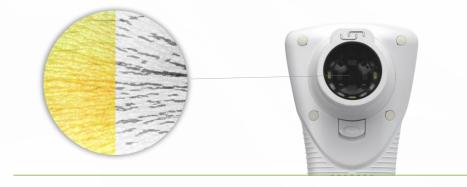

METHODE D'ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique, grâce aux différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de distinguer et de définir la taille et la profondeur des imperfections sur la peau, en l'occurrence, les rides.



> Bactérie de l'Acné

Les bactéries porphyriques apparaissent avec des infections d'acné. La peau peut avoir cette bactérie sans signes d'acné visuelle.

Essentiel pour les produits de régulation du sébum.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100, où un nombre inférieur signifie une meilleure condition.



METHODE D'ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique. Grâce à la lumière UV, Dp Skin est capable de distinguer et de définir la taille des pores infectés, en les ciblant par une couleur vert/orange vif.



> Cellules Mortes

Parfois, le renouvellement de la peau crée un excès de cellules mortes de la peau qui la rendent plus sèche et serrée.

Indispensable pour la recommandation de peelings et produits exfoliants.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100, où un nombre inférieur signifie une meilleure condition.



METHODE D'ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique. Grâce aux différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de distinguer et de définir les cellules mortes de la peau, en les faisant apparaître en couleur bleu vif.




Images de peau à fort grossissement

Recommandation de produits et de traitements Selon les résultats et le profil du client Détermination du phototype et recommandations sur les dommages solaires Suivi de l'évolution des résultats par graphique de comparaison

Suivi de l'évolution de l'état de la peau comparaison d'images Rapport de résultats et de recommandations envoyer par e-mail Exportation de données client vers un fichier CSV



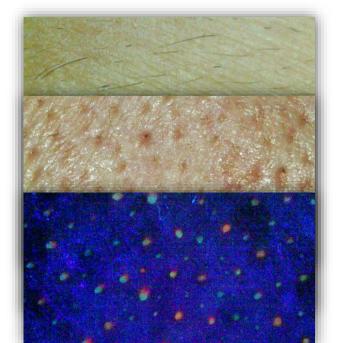

Images de peau à fort grossissement

Recommandation de produits et de traitements Selon les résultats et le profil du client

Détermination du phototype et recommandations sur les dommages solaires Suivi de l'évolution des résultats par graphique de

Suivi de l'évolution de l'état de la peau comparaison d'images Rapport de résultats et de recommandations envoyer par e-mail

Exportation de données client vers un fichier CSV (Excel)





Images de peau à fort grossissement Recommandation de produits et de traitements Selon les résultats et le profil du client

Détermination du phototype et recommandations sur les dommages solaires

Suivi de l'évolution des résultats par graphique de comparaison

Suivi de l'évolution de l'état de la peau comparaison d'images Rapport de résultats et de recommandations envoyer par e-mail

Exportation de données client vers un fichier CSV (Excel)



Images de peau à fort grossissement Recommandation de produits et de traitements Selon les résultats et le profil du client Détermination du phototype et recommandations sur les dommages solaires

Suivi de l'évolution des résultats par graphique de comparaison

Suivi de l'évolution de l'état de la peau comparaison d'images Rapport de résultats et de recommandations envoyer par e-mail Exportation de données client vers un fichier CSV (Excel)



Images de peau à fort grossissement Recommandation de produits et de traitements Selon les résultats et le profil du client Détermination du phototype et recommandations sur les dommages solaires Suivi de l'évolution des résultats par graphique de comparaison

Suivi de l'évolution de l'état de la peau Par comparaison d'images


Rapport de résultats et de recommandations envoyer par e-mail Exportation de données client vers un fichier CSV (Excel)



Images de peau à fort grossissement
Recommandation de produits et de traitements
Selon les résultats et le profil du client
Détermination du phototype et recommandations
sur les dommages solaires
Suivi de l'évolution des résultats par graphique de
comparaison
Suivi de l'évolution de l'état de la peau
Par comparaison d'images

Rapport de résultats et de recommandations Envoi par e-mail

Exportation de données client vers un fichier CSV (Excel)

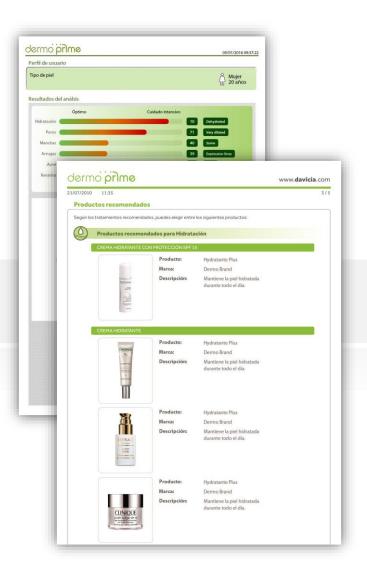


Images de peau à fort grossissement
Recommandation de produits et de traitements
Selon les résultats et le profil du client
Détermination du phototype et recommandations
sur les dommages solaires
Suivi de l'évolution des résultats par graphique de
comparaison
Suivi de l'évolution de l'état de la peau
Par comparaison d'images
Rapport de résultats et de recommandations
envoyer par e-mail



Exportation de données client vers un fichier CSV (Excel)



Images de peau à fort grossissement
Recommandation de produits et de traitements
Selon les résultats et le profil du client
Détermination du phototype et
recommandations sur les dommages solaires
Suivi de l'évolution des résultats par graphique
de comparaison
Suivi de l'évolution de l'état de la peau
Par comparaison d'images
Rapport de résultats et de recommandations
envoyer par e-mail
Exportation de données client vers un fichier CSV
(Excel)

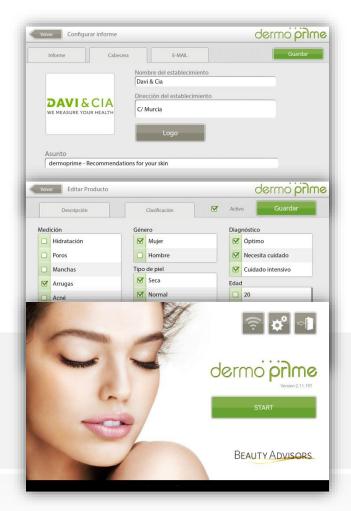




Dp personnalisation de l'appareil

Personnalisation du logiciel

Ecran de démarrage

Rapport de résultats

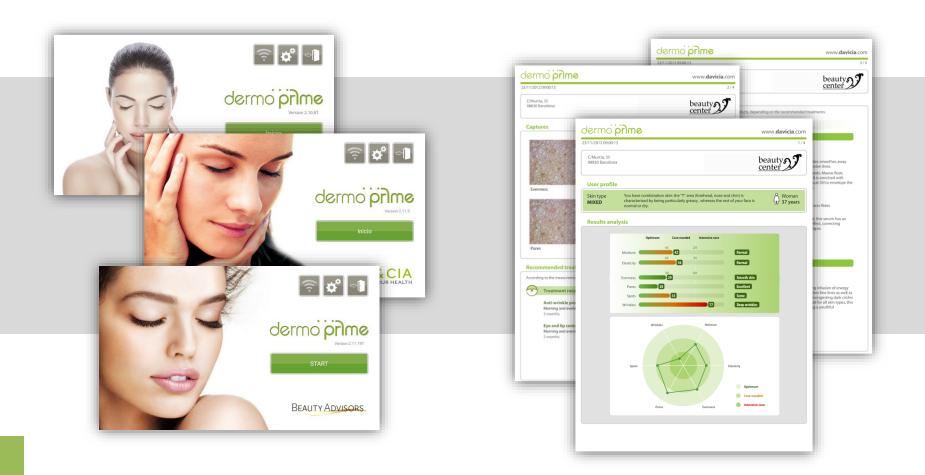


Dp personnalisation de l'appareil

Recommandation de Produits et Traitements


1 Enregistrement de votre cosmétique



2 Recommandation automatique

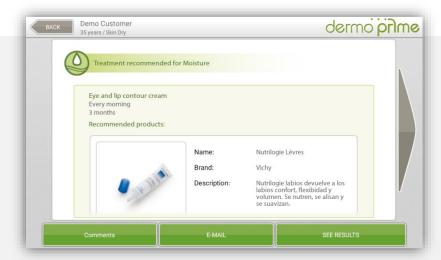

3 Rapports et recommandations peuvent être envoyés aux client(e)s par email

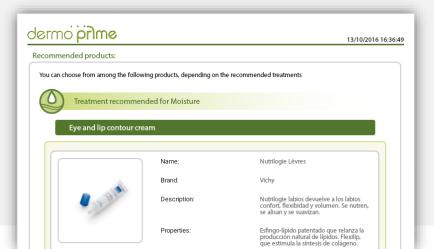




Dp opportunites & benefices

Pourquoi **Dp Skin**® est un outil indispensable ?

CLIENT(E) FINAL(E)

Le client reçoit un diagnostic complet et professionnel, lui permettant de connaitre l'état et les besoins de sa peau

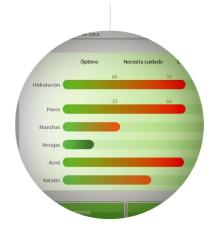

PROFESSIONNEL(LE)

Dp Skin est un outil de support extrêmement fiable et professionnel, donnant crédibilité et légitimité à la recommandation



INSTITUT

Booste les vente de cosmétiques et de traitements



